

MB24364 Sterilizzatore a raggi UV

Manuale d'uso


1、 Caratteristiche

Lo sterilizzatore a raggi UV consta di un recipiente per oggetti con incorporata una luce UV. Ha un aspetto pratico ed è utile per la sterilizzazione a ultravioletti di qualsiasi tipo di strumento: pennelli, strumenti chirurgici, coltellini, forbici, salviette asciutte, ecc.

2、 Specifiche tecniche

Nome del prodotto	Sterilizzatore a raggi UV
Codice	MB24364
Voltaggio nominale	ac. 220-240V
Frequenza di lavoro	50/60Hz
Potenza nominale	15W
Dimensioni	362*241*235mm
Peso netto	4.2 kg
Peso lordo	4.9kg

3、 Descrizione

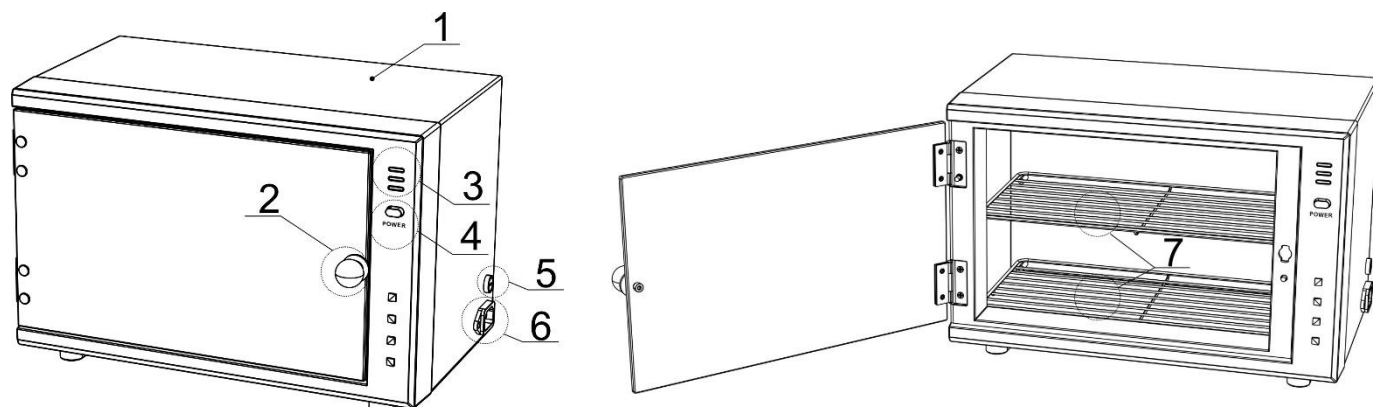

1、 macchina principale 2、 maniglia 3、 luce di funzione

4、 pulsante di accensione 5、 presa del condotto elettrico protettivo

6、 presa del cavo di alimentazione 7、 griglie di appoggio per oggetti

4、 Istruzioni per l'uso

- 1、 Mettere l'oggetto nello sterilizzatore a raggi UV, chiudere il portello e premere il pulsante di accensione per iniziare il processo di sterilizzazione.
- 2、 Rimuovere gli oggetti dopo un'ora di utilizzo.

5、 Precauzioni

Si consiglia fortemente di non prendere iniziative per smontare lo sterilizzatore a raggi UV da sé. In caso di problemi o guasti al cavo di alimentazione contattare i nostri tecnici qualificati per valutare, se fosse necessario, di restituire il macchinario per far risolvere le disfunzioni.

6、 Avvertenze

1. Spegnerne il motore dopo ogni utilizzo.
2. Leggere il manuale d'istruzioni prima di avviare il macchinario.
3. Mettere in funzione il macchinario in una stanza avente temperatura compresa tra gli 0 e i 40 gradi centigradi.
4. Mentre si utilizza il macchinario:
 - a. È consigliato incaricare una persona che controlli il macchinario mentre è in funzione.
 - b. Quando si utilizzano oggetti di vetro fare attenzione a non ferire il cliente.
 - c. Per evitare incidenti è fortemente consigliato collocare il macchinario lontano dalla portata dei bambini.
 - d. Quando il macchinario è in funzione è molto caldo: non toccare le griglie di appoggio nell'armadietto interno con le mani scoperte finché non si siano completamente raffreddate.
 - e. Non utilizzare il macchinario in bagno o vicino a fonti d'acqua.
5. Non spostare il macchinario mentre è in funzione.
6. Se gli accessori devono toccare direttamente la pelle è consigliato che il personale dipendente li controlli prima di utilizzarli sul cliente.

Non siamo responsabili di cattivi risultati dovuti ad un'installazione errata del macchinario, per esempio nel caso in cui non sia stato collocato adeguatamente sopra la superficie portante o non sia stato chiuso bene il serbatoio dell'acqua dell'oggetto da sterilizzare.